

3D打印定制鞋垫 (足托)

使用说明书

中科三维成型技术(深圳)有限公司

生产地址:深圳市龙华区大浪街道华联工业区9号3层

联系方式:15013117561

网址:<https://www.isun3d.com/>

【产品名称】	3D打印定制鞋垫(足托)
【主要结构】	由热塑性聚氨酯弹性体橡胶(TPU)高分子材料, PU泡棉、超纤材料或EVA材料制成。穿戴或放置于肢体体表, 通过限制肢体活动, 达到保持肢体稳定目的。
【适用范围】	扁平足, 跟骨骨刺, 跟骨痛, 横弓塌陷, 距骨痛, 足部受力不均, 轻度足内外翻下肢不等长, 脚大拇指僵硬, 糖尿病足, 距筋膜炎等。
【收货须知】	在收到产品后, 请尽快检查产品完整性并试穿体验。如有非常突兀的支撑及难以接受的感觉, 请于收货后两星期内反馈到经销商并进行修改, 过期视为对产品无疑义。
【穿戴方法】	<ol style="list-style-type: none">①.将鞋子鞋带解开, 保持松弛状态。②.将原版鞋垫抽出, 检查鞋内无石子异物后将鞋垫放入鞋内。如果原版鞋垫粘在鞋底, 可用热吹风机稍微加热鞋垫即可取下。③.穿戴鞋子后重新调整鞋带。鞋带不能过松或过紧, 固定且舒适即可。④.如果鞋垫前后留有空隙或者空间不足, 出现鞋垫在鞋内晃动或者弯折的情况, 建议携带鞋垫到鞋店内适配合适的码数。
【穿戴时间】	前期使用产品时可能脚下会有异物感, 此为正常表现, 是由于足弓被支撑到正常的高度, 筋膜韧带都处于拉伸状态导致。适应鞋垫需要过程, 前三天从每天1小时, 每日递增1小时, 通过慢走适应习惯鞋垫的支撑, 不要剧烈活动, 避免过度运动损伤肌肉韧带。第四天开始可以根据自身情况适当增加穿戴时间, 上限为8小时。可以选择长距离步行, 运动健身等运动。一星期后可正常日常佩戴。穿戴3个月建议进行复查, 对比第一次扫描诊断结果查看鞋垫设计是否需要更新。之后每3-6个月建议复查一次。
【产品清洗】	用牙刷沾洗衣粉或者洗衣液清洗贴面表面, 清水清洗后置于阴凉处自然风干。切勿长时间泡水, 避免太阳暴晒, 切勿热风筒吹干。
【适配鞋子】	请根据自己的足形选择合适的鞋子。不要选择鞋底过软的鞋子; 鞋垫放入鞋内后鞋子大小要合适, 不能过松或过紧; 尖头鞋可能会导致鞋垫前端变形, 请尽量避免尖头鞋, 鞋子要配有鞋带; 请注意定制鞋垫默认匹配运动鞋或较宽松的休闲鞋款。
【注意事项】	根据产品的规格选择适当的鞋进行匹配。
【使用期限】	一年
【生产日期】	
【基本信息】	备案人/生产企业/售后服务单位: 中科三维成型技术(深圳)有限公司 住 所: 广东省深圳市南山区粤兴二道6号武汉大学深圳产学研大楼A403-II 生产地址: 深圳市龙华区大浪街道华联工业区9号3层 联系方式: 15013117561 网 址: https://www.isun3d.com/
【说明书编制日期】	二〇二三年十月十日
【产品规格】	定制尺码